


使用說明

Idacio[®]

”卡比”修邁注射劑
單次使用筆型注射器
(adalimumab)皮下注射 40 mg

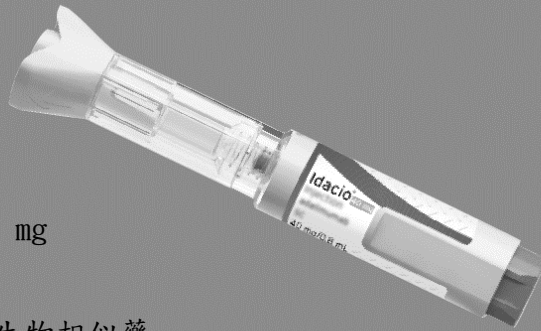

本品 Idacio 為 Humira 之生物相似藥

註：圖片僅供說明之用

使用Idacio預充填式筆型注射器之前，請仔細閱讀這些完整說明。

重要資訊


僅在若您的醫療專業人員已訓練您如何正確使用 Idacio 預充填式筆型注射器的狀況下，才可使用。

- Idacio預充填式筆型注射器為一種即用型單次使用預充填式筆，以提供完整劑量的adalimumab。
- 必須依照醫療專業人員教您的技巧進行注射。
- 未滿12歲孩童不得自行注射，必須由受過訓練的成人進行。
- 避免將Idacio預充填式筆型注射器置於孩童可取得之處。
- 請勿將您的手指放入安全護罩開口。
- 請勿使用冷凍或受陽光直接照射過的Idacio預充式筆。
- 若您有任何問題或疑慮，請洽詢醫療專業人員。

儲存資訊

- 將預充填式筆型注射器存放在原包裝盒中，避免光照。
- 將預充填式筆型注射器存放在2°C至8°C的冰箱中。
- 必要時，例如當您旅遊時，單一預充填式筆型注射器可以在室溫下存放最多14天。

認識您的Idacio預充填式筆型注射器

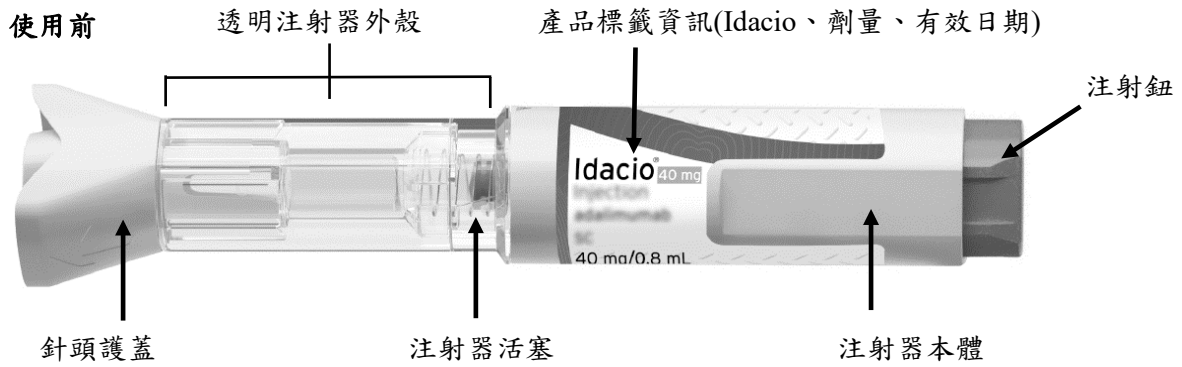

使用後



步驟 1


準備注射

每盒Idacio預充填式筆型注射器中均附有兩支或六支裝等包裝規格。

1.1 在光線充足的地方準備一個乾淨的平面，例如桌子或工作檯。


1.2 您也需要(圖A)：

- 酒精棉片(附於盒內)
- 棉球或紗布；及
- 尖銳物棄置容器。

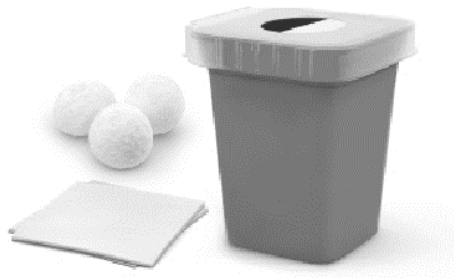


圖A

1.3 從冰箱取出包裝盒(圖B)。

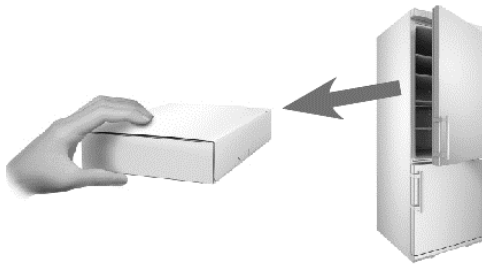

圖B

1.4 檢查包裝盒側邊的有效日期(圖C)。

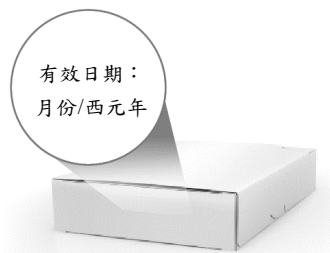


圖C

警告：若已超過有效日期，請勿使用。

1.5 從原包裝盒中取出預充填式筆型注射器：


- 將兩隻手指放在產品標籤資訊區域
- 將預充填式筆型注射器筆直拉出包裝(圖D)。

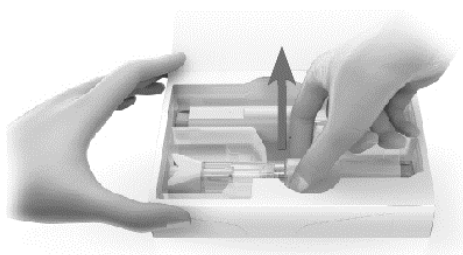

圖D

將其放在乾淨的平面上。

1.6 將原包裝盒中剩餘的預充填式筆型注射器放回冰箱(圖E)。

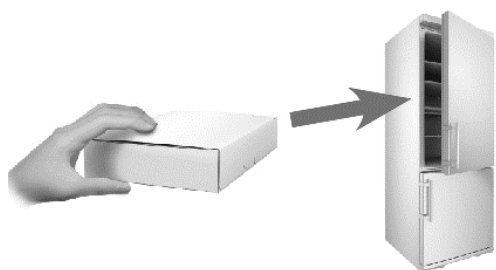

圖E

關於未使用之預充填式筆型注射器的存放方式，請參閱儲存資訊。

1.7 將預充填式筆型注射器在室溫下放置至少30分鐘，讓藥品回溫(圖F)。



圖F

注射低溫藥物會造成疼痛。

警告：請勿以其他任何方式加熱預充填式筆型注射器，例如利用微波爐、熱水或陽光直射。

警告：請勿取下針頭護蓋，直到您準備好進行注射。

步驟 2

洗手

2.1 用肥皂和清水洗淨雙手(圖G)並徹底擦乾。

警告：手套不能代替洗手的必要性。




圖G

步驟 3

檢查預填充筆

3.1 檢查透明注射器外殼，以確保：

- 液體為透明、無色及無顆粒(圖H)。
- 玻璃注射器無破裂或損壞(圖H)。

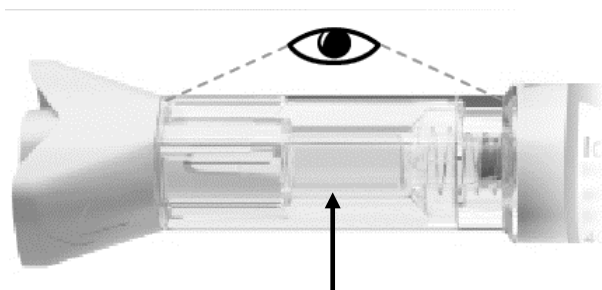

透明注射器外殼

圖H

警告：若液體含有顆粒、混濁，變色或有片狀物，或有任何損壞跡象，預充填式筆型注射器。

若上述情況發生，請將之丟入尖銳物棄置容器，並聯絡醫療人員或藥師。

3.2 檢查仿單，以確保：

- 預充填式筆型注射器名稱為Idacio (圖I)。
- 預充填式筆型注射器未超過有效日期(圖I)。



圖I

警告：若仿單名稱不是Idacio和/或已超過仿單標示之有效日期，請勿使用預充填式筆型注射器。


若上述情況發生，請將預充填式筆型注射器丟入尖銳物棄置容器，並聯絡醫療人員或藥師。

步驟 4

選擇注射部位

4.1 選擇注射部位(圖J)於：

- 大腿上方。
- 腹部(注射於距離肚臍至少5公分之處)。

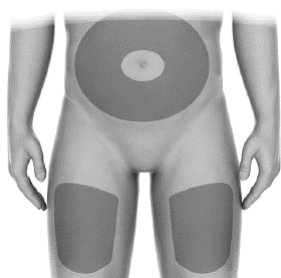

圖J

4.2 每次選擇不同的部位(與先前的注射部位相距至少2.5公分)，以減少紅腫、刺激或其他皮膚問題。

警告：請勿注射於疼痛(敏感)、瘀青、發紅、硬皮、結疤或有妊娠紋之處。


警告：若您患有乾癬，請勿注射於任何病灶或有發紅、增厚、突起或鱗片狀斑塊處。

步驟 5

清潔注射部位

5.1 用酒精棉片擦拭注射部位的皮膚，以進行清潔(圖K)。

警告：清潔後請勿吹氣或觸摸注射部位。

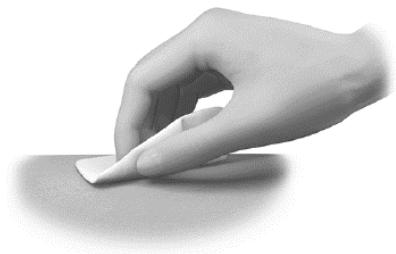


圖K

步驟 6

進行注射

6.1 取下針頭護蓋

- 握住預充填式筆型注射器朝上，筆直拉起針頭護蓋(圖L)。

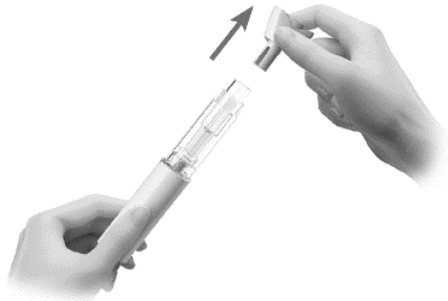

圖L

您可能會在針尖看到幾滴藥液。

- 丟棄針頭護蓋。

警告：請勿扭轉針頭護蓋。

警告：請勿重新蓋上預充填式筆型注射器。


6.2 放置預充填式筆型注射器

- 握住預充填式筆型注射器，使您可以看見透明注射器外殼。
- 將您的拇指放在黃色注射鈕上方(勿觸摸)(圖M)。



圖M


- 將預充填式筆型注射器以90°的角度貼在皮膚上(圖N)。

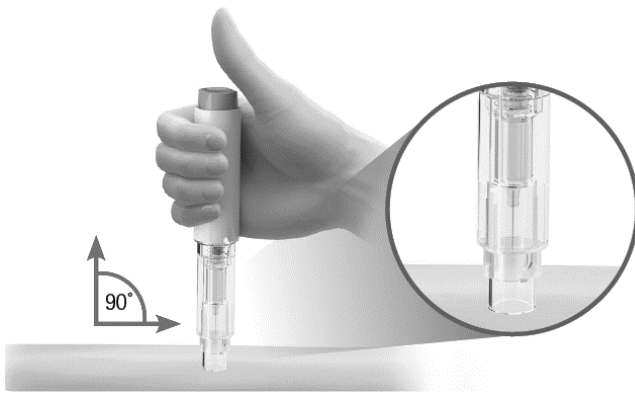

圖N

注射前

- 穩穩握住預充填式筆型注射器，推動並緊貼您的皮膚，直到安全護罩完全壓到底。此動作將解開注射鈕(圖O)。

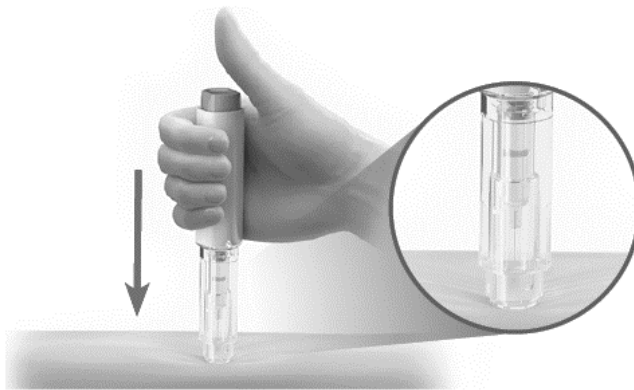


圖O

注射前

6.3 執行注射

- 按下注射鈕(圖P)。
- 您會聽到一個響音，表示已開始注射。
- 持續穩穩握住預充填式筆型注射器。
- 觀察注射器活塞，以確保其一直向下移動至底部(圖P)。

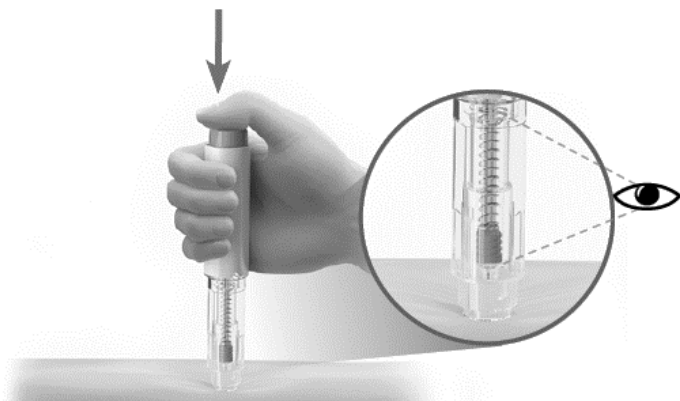


圖P

注射後

警告：請勿從皮膚上拔起預充填式筆型注射器，直到將活塞向下推到底並注射完所有液體。

- 當注射器活塞移至底部且停止移動時，持續握住5秒。
- 從皮膚上拔起預充填式筆型注射器(圖Q)。


安全護罩將下滑及鎖定到位，保護您不被針刺(圖Q)。

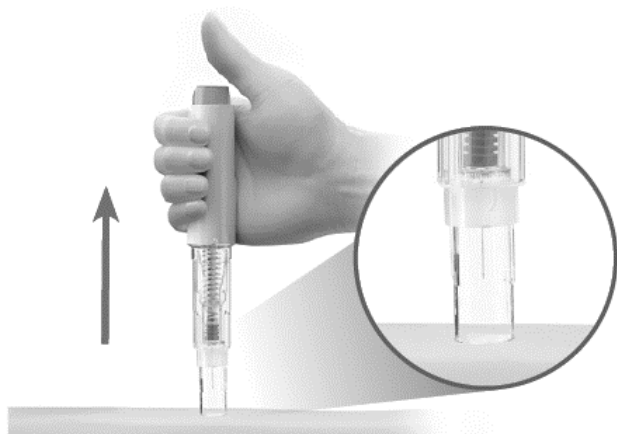

圖Q

警告：若您有任何問題，請聯絡醫療人員或藥師。

6.4 若皮膚上有血液或液體，請用棉球或紗布輕按於注射部位(圖R)。

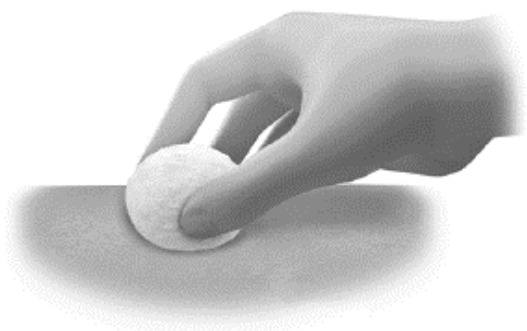

圖R

步驟 7

丟棄預填充筆

7.1 使用後，請立即將使用過的預充填式筆型注射器丟入尖銳物棄置容器(圖S)。



圖S

警告：避免將您的尖銳物棄置容器置於孩童可取得之處。

警告：請勿將預充填式筆型注射器丟入家用垃圾桶。

若您無尖銳物棄置容器，您可以使用以下類型的家用容器替代：

- 由重型塑膠製成；
- 能用一個尺寸剛好且防刺穿的蓋子關上；可以防止尖銳物露出來、
- 使用過程中穩定直立、
- 防漏；及
- 適當標示，以警告容器內含有害廢棄物。

7.2 當您的尖銳物棄置容器快要裝滿時，您將需要遵循當地規範，以正確的方式處理您的尖銳物棄置容器。

請勿回收已使用過的尖銳物棄置容器。

步驟 8

記錄注射

8.1 為了幫助您記住下次注射的時間和注射部位，您應記錄並保留每次的注射日期和注射部位(圖T)。



圖T