

骨穩® FORTÉO® 大家常有的疑問

問題1. 按下黑色注射按鈕後，還是看得到黃色筆管。我該如何重設骨穩？

解答： 遵照以下步驟重設骨穩：

- 1) 如果您已經注射過骨穩，請「不要」在同一天再次注射。
- 2) 拔除針頭。
- 3) 裝上新的針頭，拔起外針頭蓋，等待使用後蓋回。
- 4) 將黑色注射鈕拉開到底。確認已經露出紅線。
- 5) 拔起並丟棄內針頭蓋。
- 6) 將針頭朝下對著空瓶，將黑色注射鈕按到底，按著不放，「慢慢地」從1數到5。您應該會看到一小串液珠或一小滴液體流出。注射完後，黑色注射鈕應該已經按到底。
- 7) 如果還是看得到黃色筆管，請詢問醫護人員。
- 8) 將外針頭蓋蓋回針頭上。旋轉外針頭蓋3到5圈，就可以將針頭整個轉開。針頭拔除之後，遵照醫護人員的指示丟棄。蓋回白色筆蓋。每次使用後，請立即將骨穩放到冰箱內貯存。

只要每次注射時都使用新的針頭，並且都把黑色按鈕按到底，慢慢地從1數到5，就可以避免發生這個問題。



問題2. 怎麼知道骨穩有沒有注射出正確的劑量？

解答： 只要遵照「使用說明」指示使用，骨穩就能每次都注射出完整劑量。如果黑色注射鈕已經按到底，就表示骨穩已注射出完整劑量。

每次注射請更換新針頭，以確保骨穩能注射出正確的劑量。

問題3. 骨穩裡有氣泡。

解答： 小氣泡不會影響到注射的劑量，也不會對您造成傷害，因此您可以一如往常繼續使用。

問題4. 針頭拔不下來。

- 解答：**
- 1) 將外針頭蓋蓋回針頭上。
 - 2) 用外針頭蓋來轉開針頭。
 - 3) 旋轉外針頭蓋3到5圈，就可以將針頭整個轉開。
 - 4) 如果您還是無法拔除針頭，請向其他人尋求協助。

問題5. 黑色注射鈕拉不開，該怎麼辦？

解答： 請遵照醫護人員的指示，更換新的骨穩。雖然您可能還會看到藥筒內殘留一些藥物，但無法拉開黑色注射鈕，就代表您已經用完所有能準確注射的藥量。

骨穩® FORTÉO® 相關產品資訊

請撥免費諮詢專線：**0800-889900**



Forteo®(teriparatide, rPTH(1-34))

適應症：停經後婦女骨質疏鬆症具高度骨折風險者、男性原發性或次發性腺功能低下症之骨質疏鬆症且具高度骨折風險者、女性及男性因糖化皮質類固醇治療引起之骨質疏鬆症且具高度骨折風險者。

使用方法：20mcg 一天一次，皮下注射於大腿或腹部。

初次使用應在病患可以坐下或躺下的環境投予，以防發生姿勢性低血壓。治療2年以上的療效與安全性尚未評估，因此不建議使用本藥超過2年。

使用禁忌：孩童或對本藥任何成份過敏或較高危險性發生骨肉瘤的病人禁用本藥。常見的不良反應(≥10%)：暫時性血鈣升高、疼痛、關節痛、噁心。

此外臨床試驗中曾報告有較多的頭暈、腳部抽筋。詳細不良反應與注意事項請參照Forteo藥品說明書。

相關副作用、注意事項等，請參閱仿單

本資料僅供醫藥專業人員教導病患使用

MKT-RP-15-010-Oct-28

Lilly

台灣禮來股份有限公司
台北市復興北路365號11樓
TEL:(02)2715-2950

骨穩® FORTÉO® 注射筆圖解

黑色注射鈕

黃色筆管

紅線

藍色筆桿

白色筆蓋

藥筒

針頭

內針頭蓋

外針頭蓋

標籤紙

骨穩® FORTÉO®
需冷藏於2-8°C
(不可冷凍)

FORTÉO® 骨穩®
teriparatide (rDNA origin)
injection


FORTÉO® 骨穩®
teriparatide (rDNA origin)
injection

Lilly


骨穩® FORTÉO® 注射筆使用說明 — 快速指引

注射前請洗手。遵照醫護人員的指示清潔消毒注射部位。

1 打開白色筆蓋

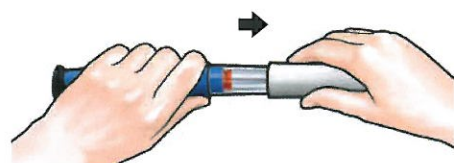

用酒精棉片消毒注射小瓶底端的紅色橡皮塞

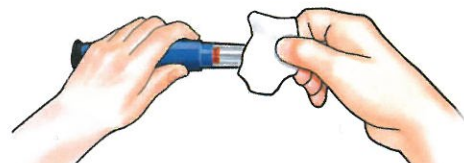

2 裝上新的針頭




撕下標籤紙



將針頭直直地裝在藥筒上



把針頭轉緊

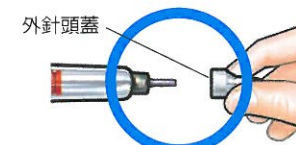

拔起外針頭蓋，等待使用後蓋回

3 設定劑量

將黑色注射鈕拉開到底如果拉不開黑色注射鈕請參見「常見問題，問題五」



確認紅線已經露出



拔起並丟棄內針頭蓋



4 注射



消毒注射部位

輕輕捏起一小塊大腿或腹部的皮膚，將針頭垂直刺入捏起的皮膚。



將黑色注射鈕按到底之後按住不放，「慢慢地」從1數到5，再拔起注射筆。



1... 2... 3... 4... 5...

5 檢查注射劑量



注射完後：拔出注射筆後，請確認黑色注射鈕已經按到底。只要黃色筆管沒有露出來，便表示您已經正確完成注射步驟。

重要



您應該「不」會看到黃色筆管。如果您已經注射完畢卻看到黃色筆管，請勿在同一天再次注射，請「務必」重設骨穩。（參見常見問題，問題一）


6 移除針頭



將外針頭蓋蓋回針頭上




旋轉外針頭蓋3到5圈，就可以將針頭整個轉開

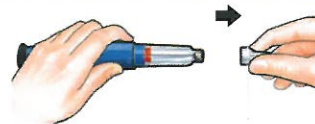

針頭拔除之後，遵照醫護人員的指示丟棄。



蓋回白色筆蓋。每次使用後，請立即將骨穩放到冰箱內貯存。

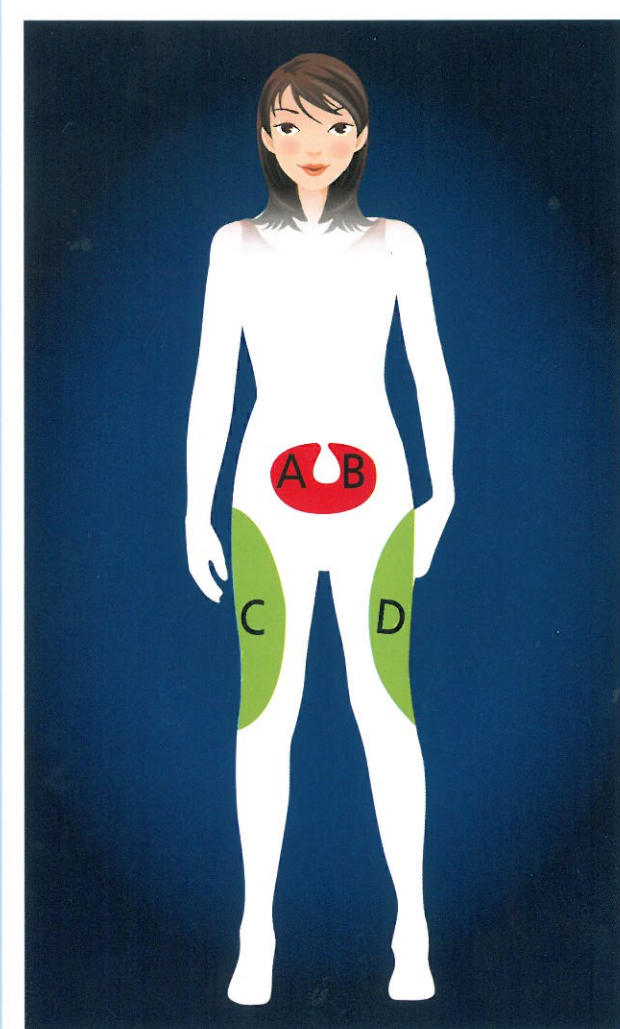

注射的關鍵部位

■ 腹部 (A.B)：

在肚臍兩側約一個手掌寬的距離注射，且避免中間白色部位。愈朝側面注射，針頭愈易扎到肌肉。即便身體過重者，其皮下層越往旁邊是越細嫩。

■ 大腿外側 (C.D)：

只能由正面或側面進行大腿注射，因為微血管及神經多分布內側。